

コンタクトつける前に

コンティア®

うるおいフィット

コンタクト
レンズ
装着液

指定医薬部外品

コンティア®の特長

1

うるおい成分配合

コンティア®は優れた保湿効果を持つヒアルロン酸ナトリウムを添加物として配合。コンタクトレンズにうるおいを与え、コンタクトレンズ装着時のゴロゴロ感・異物感を軽減しレンズ装着を容易にします。

2

防腐剤無添加

コンティア®は1本ずつ無菌充てんした使い切りタイプの装着液。毎回使用時に開封するため防腐剤を含まなくても細菌が繁殖することはありません。

3


全てのコンタクトレンズに使えます

コンティア®はワンデータイプはもちろん新素材シリコンハイドロゲルレンズを含む全てのソフト、使いすて、O₂、ハードレンズにお使いいただけます。

使用方法



レンズに直接
液を落とす。

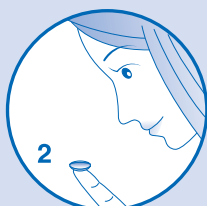

そのまま
レンズを瞳に
装着する。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (4) 次の症状がある人
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人 ・はげしい目の痛み
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2 次の場合は直ちに使用を中止、 この文書を持って医師または薬剤師に 相談してください。

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【販売名】コンティアa


【効能・効果】ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズの装着を容易にする。

【用法・用量】1.コンタクトレンズの両面を本剤2～3滴で濡らします。

2.そのままレンズを眼に装着します。

○次の注意事項をお守りください。

- (1) 使用に関しては、この説明文書をよく読んでください。説明文書に記載されている用法・用量を守って使用してください。
- (2) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開けてください。
(勢いよく開封すると、液が飛び散る場合があります)
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤はコンタクトレンズの装着のみに使用し、飲まないでください。
- (5) 混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- (6) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

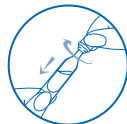

【成分・分量】100mL中：ポリビニルアルコール（部分けん化物）1.0g
添加物としてヒアルロン酸ナトリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、D-マンニトール、pH調整剤を含有する。

【包装】0.5mL×30本・0.5mL×90本

保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 薬液を他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1本を他の人と共用しないでください。
- (5) 使用后に液が残っていても、再使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後は速やかに使用してください。
- (7) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろのポケット等に入れないでください。
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)

■コンタクトレンズご使用の際の注意

- *コンタクトレンズを取り扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。
- *コンタクトレンズを清潔に、また、正常に保つために保存、洗浄については十分心がけてください。
- *コンタクトレンズご使用の方は、眼科医による定期検査を必ずお受けください。