

必ず同時にご使用ください。 本システムは、**I 消毒・中和錠**と**II 溶解・すすぎ液**を同時に使用してはじめて消毒・洗浄効果が得られます。

I 消毒・中和錠	II 溶解・すすぎ液
	<p>I 消毒・中和錠を溶かすために使用します。また、装用前にレンズのすすぎにも使用します。</p>
<p>絶対に飲まないでください</p>	

困った時は

HPで製品の使用方法やQ&Aをご確認いただけます。



用法および用量

1. レンズケースに消毒・中和錠1錠と溶解・すすぎ液をレンズケースの線(8mL)まで入れる。
2. コンタクトレンズを入れ、蓋を閉める。
3. そのまま4時間以上静置後、コンタクトレンズを溶解・すすぎ液でよくすすぐ。

△ 使用上の注意

守らなければならないこと

1. この使用説明書に記載された使用方法や注意事項を必ず守ってください。
2. 低温下(10℃以下)ではケアに時間を要する場合があります。
3. ケア開始時に液がオレンジ色にならなかった場合は、レンズケース内の液をすて、ケースを水道水で洗った後、清潔なティッシュで拭いて、再度はじめからケアをやり直してください。
4. ケアを始めて4時間以上経っても液やレンズが着色している場合は、レンズケースを数回振ってケース内の溶液を混和し、しばらく静置してください。着色が消えない場合は、レンズケース内の液をすて、ケースを水道水で洗った後、清潔なティッシュで拭いて、再度はじめからケアをやり直してください。
5. ケア後24時間以上保存したレンズを装用する場合は、装用前に再度通常のケアを行ってください。

してはいけないこと

1. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。使用期限は製品の背面に記載しています。
2. 変色した錠剤、アルミシートに破れがみられた錠剤は使用しないでください。正しいケアができない恐れがあります。
3. 中和が完全に終わっていない状態(液やレンズが着色)で、レンズを装用しないでください。
4. ケア後の液を直接目に入れないでください。誤って目に入った場合は、すぐに多量の水で目を洗い、眼科医の診察を受けてください。

相談すること

1. 次の人は使用前に眼科医に相談してください。
 - 今までに目のアレルギー症状(たとえば目の充血、かゆみ、はれ、発疹・発赤等)を起こしたことがある人。
 - 眼科医の治療を受けている人。
 - ヨウ素に対し過敏症等の既往歴のある人。
2. 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、痛み、充血、流涙、目ヤニ、異物感、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、眼科医に相談してください。そのまま装用し続けると、眼障害につながることもあります。

保管および取り扱い上の注意

1. 製品は高温多湿を避け、常温(1℃～30℃)で保管してください。
2. 開封後はすみやかに使用してください。
3. 錠剤を取り出す時に、周りのアルミシートを破らないよう注意してください。
4. 錠剤は吸湿しやすいため、アルミ袋を開封後は錠剤シートをアルミ袋に戻して保管してください。

専用レンズケースの取り扱いについて

1. 液の入ったレンズケースは持ち歩かないでください。液がもれることがあります。
2. 使用後のレンズケースは水道水でよく洗い、ふたとケースを別々に自然乾燥させてください。
3. レンズケースは製品のご購入ごとに、必ず新しいものと交換してください。