

cleadew

クリアデュール

O₂セプト

Ophtecs

O₂・ハードコンタクト
レンズ用酵素洗浄保存剤

O₂・ハードコンタクトレンズに使用できます

この説明書は大切に保管してください

- ご使用前に必ずこの使用説明書をよく読み、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
- 使用説明書に記載された使用方法や注意事項を必ず守ってください。正しいレンズケアを行わないと、アcantアメーバ角膜炎等の重篤な眼感染症や眼障害につながるおそれがあります。
- ご使用中のハードコンタクトレンズの取り扱いについてはレンズの取扱説明書をよく読み、使用方法等を守ってください。

ハードコンタクトレンズには、涙液中のタンパク質や老廃物などの汚れが付着します。これらの汚れをそのままにしておくと、装着感が悪くなるばかりでなく、細菌やカビの繁殖にもつながり、眼障害を起こす場合があります。このようなことを防ぐため、ハードコンタクトレンズのケアを正しく行うことが必要です。cleadew O₂セプトは、レンズケースに中和錠と液剤を入れるだけのかんたんケアで、従来のコンタクトレンズの洗浄・保存・タンパク除去だけではなく、ポピドニードによってレンズの除菌も行える、O₂・ハードコンタクトレンズ用ケア用品です。

～ 眼感染症を起こさないために ～

正しいレンズケアを行わないと、アcantアメーバ角膜炎等の重篤な眼感染症につながるおそれがあります。眼感染症を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



●使用後のレンズケースは、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。



●眼科医等の専門家に、正しいケア方法の指導を受けましょう。



●レンズケースは6ヵ月以内を目安に必ず取り換えてください。



●レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手を洗ってください。



●目の健康を守るため、3ヵ月に1度は定期検査を受けましょう。


使用方法

1
2
3



手洗い

- レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。
- 常温で使用してください。
- この液剤をレンズケースに入れる前に、必ず中和錠を先に入れてください。
- この液剤のみで、レンズの洗浄や保存はしないでください。

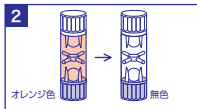

保存ケースにレンズをセットし、中和錠1錠を入れ、液剤を9分目まで入れてください。
※中和錠を入れないと、レンズが着色する恐れがあります。

蓋をしめ、そのまま4時間以上放置してください。

レンズをホルダーに入れたまま、水道水で十分すすいであらうしてください。
※水流が強すぎるとレンズがホルダーから外れる恐れがありますのでご注意ください。

- 使用後のレンズケースは、水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。
- レンズの汚れがひどい場合は、別途タンパク・脂肪除去剤などを使用してください。

レンズの長期保存方法

ケア完了後、レンズケースのふたを開けなければ、そのまま1ヵ月間レンズを保存できます。1ヵ月を超えて保存する場合は、1ヵ月に1回cleadew O₂セプトでケアを行ってください。レンズを装着する前には、水道水でレンズをすすいでください。
※常温で保存してください。※cleadew O₂セプトの液剤のみでレンズを保存しないでください。

容器の先にはふれない

容器の先が指先やレンズに触れると、雑菌などにより液が汚染されるおそれがあるため、触れないように注意してください。



液のつめかえは禁止

品質を保持し、十分な効果を発揮するために、他の容器に入れかえたり、小分けしたりはしないでください。



△ 使用上の注意

守らなければならないこと

- 1.この使用説明書に記載している使用方法を厳守してください。使用方法を誤るとケアが不完全となり、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- 2.レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。
- 3.使用後のレンズケースは空にして、水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。清潔なレンズケースを使用しないと雑菌が繁殖し、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることがあります。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

してはいけないこと

- 1.ソフトコンタクトレンズには使用しないでください。
- 2.容器の先端を、ハードコンタクトレンズや指などで触れないでください。雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがあります。また混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- 3.中和錠または液剤を飲んでしまった場合は、多量の水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- 4.中和錠または液剤が誤って眼に入った場合は、すぐに多量の水道水またはぬるま湯で眼を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- 5.割れた中和錠は使用しないでください。十分なケアが行われない可能性があります。
- 6.一度使用した薬液は再使用しないで、毎回新しい薬液を使用してください。
- 7.使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 8.万一、開封時に中和錠に変色や変質、シートの破れなどが認められた場合は、使用しないでください。
- 9.点眼したり、飲んだりしないでください。万一、中和錠または液剤を飲んでしまった場合は、多量の水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。

相談すること

- 1.次の人は使用前に眼科医に相談してください。
 - 今までに目のアレルギー症状(たとえば目の充血、かゆみ、はれ、発疹・発赤等)を起したことがある人。
 - 眼科医の治療を受けている人。
 - ヨウ素に対し過敏症等の既往歴のある人。
- 2.本剤を使用したハードコンタクトレンズを装用中、または装用後に、痛み、充血、流涙、目ヤニ、ごろごろ感(または異物感)、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにレンズをはずし、眼科医に相談してください。そのまま装用し続けると、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害につながる可能性があります。

保管および取り扱い上の注意

- 1.小児の手の届かない所に保管してください。
 - 2.誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
 - 3.レンズケースは長期間使用していると汚れ等の蓄積により雑菌などの繁殖を招くことがあります。レンズケースは6か月以内を目安に、必ず新しいものと交換してください。
 - 4.容器を開封したら、すみやかに使用してください。
 - 5.ご使用のレンズケースによって液が余る場合がございます。余った場合は破棄してください。
 - 6.本製品はオレンジ色の液体で、衣服等に付着すると着色しますので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
 - 7.ケア完了後、洗い場のシンク等に本剤が残らないよう、必ずよく洗い流してください。材質によって色が落ちにくくなることもありますので注意してください。
- ※洗い流さずに放置すると、着色が落としにくくなり、変色やさびが発生する可能性があります。

レンズケースについて

必ず、中和錠が中央部分で留まる
クロスタイプのレンズケースを
使用してください。



確認



クロスタイプ



セバレートタイプ



完全貫通タイプ

間切りのあるセバレートタイプ(二室構造)や中和錠が通り抜ける完全貫通タイプでは使用できません。

△ オルソケラトロジールレンズをご使用の方は専用レンズケースを使用してください。

〈配合成分〉

液剤：ポビドンヨード、陰イオン界面活性剤

中和錠：亜硫酸Na、タンパク分解酵素

◎本剤およびコンタクトレンズケアに関するお問い合わせ

オフテクスお客様相談室

0120-021094

受付時間／平日 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

UD FONT

この説明書は、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



株式会社 オフテクス 神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp