

レンズと瞳の健康を考えた1回使い切りタイプ ティアーレ®シリーズ

# ティアレ® うるおい フィット

コンタクト  
レンズ  
装着液

指定医薬部外品

## 特長

### 1 うるおい成分配合

優れた保湿効果を持つヒアルロン酸Naを添加物として配合。コンタクトレンズにうるおいを与え、コンタクトレンズ装着時のゴロゴロ感・異物感を軽減しレンズ装着を容易にします。

### 2 防腐剤フリー

防腐剤は角膜上皮に障害を与える危険性がありますが、「ティアレ®うるおいフィット」は目にもレンズにもやさしい防腐剤フリー処方です。

### 3 全レンズ対応

すべてのコンタクトレンズにお使いいただけます。


ソフト

使い捨て


O<sub>2</sub>

ハード

## 使用方法

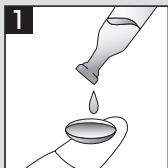

1 レンズに  
直接液を  
落とす。  
1回2~3滴

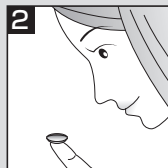

2 そのまま  
レンズを  
目に装着  
する。

# ⚠ 使用上の注意



## 相談すること

### 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (4) 次の症状がある人  
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人 ・はげしい目の痛み  
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

### 2 次の場合は直ちに使用を中止、 この文書を持って医師または薬剤師に 相談してください。

使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【販売名】コンティアa


【効能・効果】ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズの装着を容易にする。

【用法・用量】1.コンタクトレンズの両面を本剤2～3滴で濡らします。

2.そのままレンズを眼に装着します。

○次の注意事項をお守りください。

- (1) 使用に関しては、この説明文書をよく読んでください。説明文書に記載されている用法・用量を守って使用してください。
- (2) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開けてください。  
(勢いよく開封すると、液が飛び散る場合があります)
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤はコンタクトレンズの装着のみに使用し、飲まないでください。
- (5) 混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- (6) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

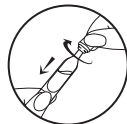

【成分・分量】100mL中：ポリビニルアルコール（部分けん化物）1.0g  
添加物としてヒアルロン酸Na、無水リン酸一水素Na、無水リン酸二水素Na、塩化Na、塩化K、D-マンニトール、pH調整剤を含有する。

【包装】0.5mL×30本

### 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 薬液を他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 1本を他の人と共用しないでください。
- (5) 使用后に液が残っていても、再使用しないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後はすみやかに使用してください。
- (7) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろのポケット等に入れてください。  
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)

### ■コンタクトレンズご使用の際の注意

- \*コンタクトレンズを取扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。
- \*コンタクトレンズを清潔に、また、正常に保つために保存、消毒、洗浄については十分心がけてください。
- \*コンタクトレンズご使用の方は、眼科医による定期検査を必ずお受けください。